

Entretien

Déclencheur d'appel mobile

#102264



La gamme sans fil Gets a été conçue pour nécessiter un entretien minimum. Le boîtier est antibactérien et ne nécessite aucun entretien en dehors d'un nettoyage régulier. Le nettoyage du boîtier et de la membrane peut s'effectuer à l'aide d'éthanol. Cependant après plusieurs désinfections, il existe un risque de décoloration du boîtier.

Note : Certaines pièces subissent toutefois inévitablement une certaine usure avec le temps; vous trouverez dans les pages suivantes les informations nécessaires à leur remplacement.

Vue d'ensemble



1	Bouton d'appel
2	Led de signalisation ¹
3	Contact reed (détection par aimant)


¹Voir fiche « signification des codes couleurs »

Vue de dessous



1	Barrettes pour le bracelet
2	Point de fixation du collier
3	Vis de fermeture (T6)

Vue intérieur

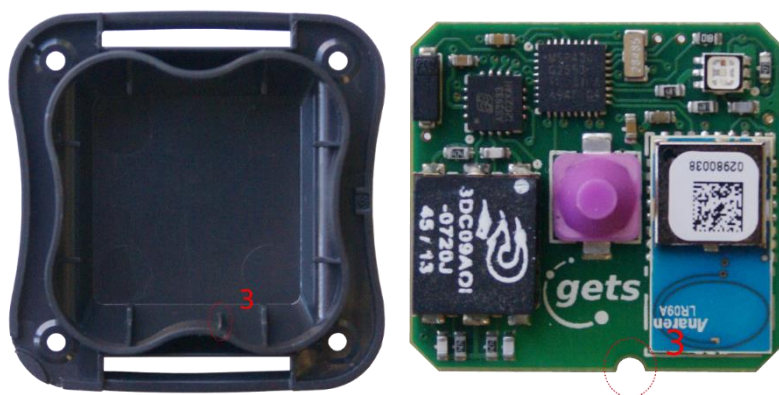

3	Circuit imprimé
3	Encoche

Remplacement de la pile

La durée de vie des batteries du déclencheur d'appel est d'environ deux ans pour une utilisation normale.

Cette durée peut fortement varier en fonction des conditions d'utilisation, notamment lors de l'utilisation d'appels positionnés et / ou de systèmes anti-errance

Lorsque la batterie est faible, le déclencheur d'appel envoie un message à la centrale. Il n'est en principe pas nécessaire de remplacer la pile tant qu'un appel "batterie faible" n'a pas été émis.

Le déclencheur peut fonctionner encore environ une semaine avec une batterie faible.

Pièces de remplacement :

- 1x pile CR2032

Matériel nécessaire :

- 1 tournevis Torx T6
- Eteindre l'émetteur R/5002
- Ouvrir le boîtier à l'aide d'un tournevis Torx T6
- Retirer délicatement le circuit imprimé en faisant levier avec le tournevis
- Pousser la pile vers l'extérieur à l'aide d'un outil non métallique afin d'éviter tout court-circuit
- Insérer la nouvelle pile, pôle négatif contre le circuit
- Remettre le circuit dans le boîtier, en faisant attention à l'emplacement de l'encoche
- Repositionner la membrane et la partie supérieure du boîtier
- Visser le boîtier
- Allumer l'émetteur R/5002



Remplacement du bracelet/collier

Grâce au design innovant, le déclencheur d'appel peut être utilisé en bracelet ou en pendentif, le passage de l'un à l'autre se fait simplement et sans outil.

- Enlever le bracelet ou l'ancien cordon
- Passer l'anneau du cordon dans l'orifice prévu à cet effet
- ou**
- Passer le nouveau bracelet dans les barrettes prévues à cet effet



Remplacement du boîtier

Pièces de remplacement :

- 1x Boîtier vide

Matériel nécessaire :

- 1 tournevis Torx T6
- Eteindre l'émetteur R/5002
- Ouvrir le boîtier à l'aide d'un tournevis Torx T6
- Retirer délicatement le circuit imprimé
- Insérer le circuit dans le nouveau boîtier, en faisant attention à l'emplacement de l'encoche
- Positionner la membrane et la partie supérieure du boîtier
- Visser le boîtier
- Allumer l'émetteur R/5002