

# Entretien

## Tapis Care Mat®

#102963

Certaines pièces subissent toutefois inévitablement une certaine usure avec le temps ; vous trouverez dans les pages suivantes les informations nécessaires à leur remplacement.

### Vue d'ensemble




### Vue de dessous



1-6	Vis de fermeture (T0)
-----	-----------------------

## Vue de l'intérieur

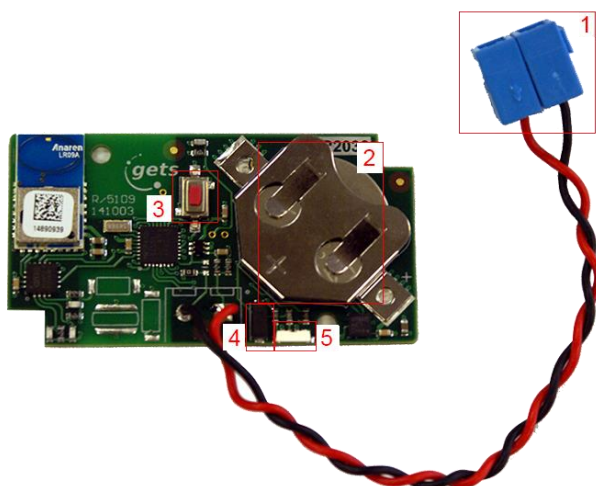

<b>1</b>	Connecteur
<b>2</b>	Pile
<b>3</b>	Bouton
<b>4</b>	Contact REED
<b>5</b>	LED

## Remplacement de la batterie

La durée de vie de la batterie du déclencheur d'appel pour tapis CareMat® est d'environ deux ans pour une utilisation normale.

Cette durée peut fortement varier en fonction des conditions d'utilisation, notamment lors de l'utilisation d'appels positionnés.

Lorsque la batterie est faible, le déclencheur d'appel envoie un message à la centrale. Il n'est en principe pas nécessaire de remplacer la pile tant qu'un appel "batterie faible" n'a pas été émis.

Les déclencheurs peuvent fonctionner encore environ une semaine avec une batterie faible.

## Remplacement de la pile

### Pièces de remplacement :

- 1x pile CR2032

### Matériel nécessaire :

1 tournevis cruciforme 0

- Ouvrez le boîtier à l'aide d'un tournevis cruciforme 0
- Retirez délicatement le circuit imprimé en faisant levier avec le tournevis
- Eteignez l'émetteur 102963
- Poussez la pile vers l'extérieur à l'aide d'un outil non conducteur
- Insérez la nouvelle pile, pôle négatif contre le circuit
- Allumer l'émetteur 102963
- Remettez le circuit dans le boîtier, en faisant attention que tous les fils entre bien dans l'emplacement prévu
- Visser le boîtier