

Intégration du module_print Radio GETS MSS Au Tapis CareMat®

#102963

1^{ère} étape :


Dévisser les 5 vics afin d'ouvrir l'emplacement où vous connecterez le module au tapis
A l'aide d'un tournevis cruciforme 0



2^{ème} étape :

Connecter le module au tapis

1) Le circuit

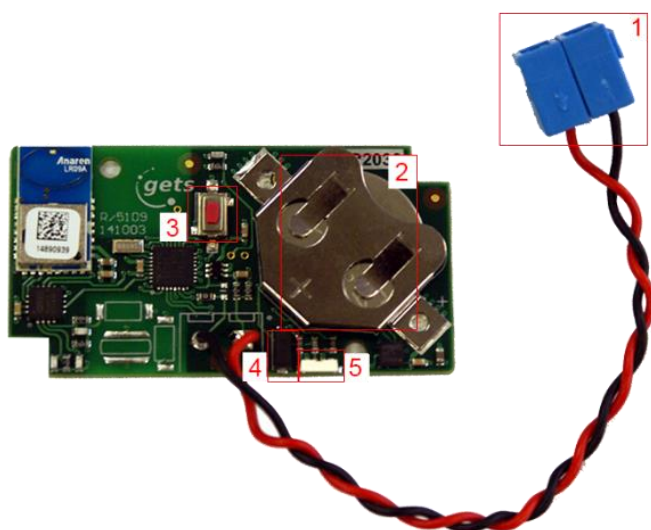

1	Connecteur
2	Pile
3	Bouton
4	Contact REED
5	LED

2) Connection :



Attention à bien enfoncer les fils dans le wago.
Les fils doivent être sur la même rangée que ceux déjà présent sur le print.
Note : La polarité n'a pas d'importance car le tapis est un simple "bouton poussoir"

3^{ème} étape :

Refermer l'emplacement.



4^{ème} étape : Coller l'étiquette fournie avec le module GETS.

